

## Digitální sterilizátor Weelko S-02

### VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dochází při nesprávném použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou v tomto návodu uvedeny nějaké chyby, prosím neváhejte a pošlete nám informující e-mail, abychom mohli chyby opravit.

Sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných kovových nástrojů.

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické komptabilitě: 2004/108/EC

### NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Vložte nástroje určené k desinfekci do sterilizátoru.
2. Zapněte napájení. Když se rozsvítí světlo, dezinfekce začíná.
3. Doporučený čas pro desinfekci je mezi 30 a 45 minut.
4. Až světlo zhasne, mohou být nástroje vytaženy a použity.

### UPOZORNĚNÍ

1. Prosím nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
2. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
4. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
5. Nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné, se nesmí v tomto přístroji používat.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Doporučená provozní doba:** 30 - 45 minut

**Výkon:** 12 W

**Rozměry výrobku:** 40 x 24 x 21 cm

**Hmotnost produktu:** 2,5 kg

**Rozměry balení:** 41 x 25,2 x 22 cm

**Hmotnost balení:** 3 kg

**Napětí:** 100V-120V/220V-240V

**Frekvence:** 50-60Hz

## Digitálny sterilizátor Weelko S-02

### VITAJTE!

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nie ste istí správnym použitím prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dochádza pri nesprávnom použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ sú v tomto návode nejaké chyby, pošlite nám prosím informujúce email, aby sme mohli chyby napraviť.

Sterilizátor má okamžité čistenie a sterilizáciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratória atď., na sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov.

### ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej komptabilite: 2004/108/EC

### NÁVOD K POUŽITIE

1. Vložte nástroje na dezinfekciu do sterilizátora.
2. Zapnite napájanie. Keď sa rozsvieti svetlo, dezinfekcia začína.
3. Odporúčaný čas pre dezinfekciu je medzi 30 a 45 minút.
4. Až svetlo zhasne, môžu byť nástroje vytiahnuté a použité.

### UPOZORNENIE

1. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni atď.).
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
4. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovou taškou alebo iným prikrývkou.
5. Nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné, sa nesmie v tomto prístroji používať.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Odporúčaná prevádzková doba:** 30-45 min

**Výkon:** 12 W

**Rozmery výrobku:** 40 x 24 x 21 cm

**Hmotnosť produktu:** 2,5 kg

**Rozmery balenia:** 41 x 25,2 x 22 cm

**Hmotnosť balenia:** 3 kg

**Napätie:** 100V-120V / 220V-240V

**Frekvencia:** 50-60 Hz