



Sterilizátor SilverFox S-01M

VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroj si prosím pozorně přečtete následující instrukce. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné úrazy, k nimž dojde při nesprávném použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou v návodu uvedeny nějaké chyby, informujte prosím výrobce nebo dodavatele.

Vysokoteplotní sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných kovových nástrojů.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES.
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Do přístroje vsypte všechny přiložené perličky. Přístroj zapojte do el. sítě a zapněte jej. Stiskněte přepínač, přístroj vydá zvukový signál a přístroj začne nahřívat a odpočítávat 15 minut do úplného nahřátí.

2. Po uplynutí této doby se ozve 3x signál a přístroj je připraven k použití.

3. Nyní můžete do sterilizátoru vložit nástroje a stisknutím tlačítka „START“ jej uvedete do provozu. Sterilizace trvá 20 sekund. Po dokončení sterilizace se ozve 3x signál.

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
2. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
4. Křemenné perličky uvnitř sterilizátoru je nutné čistit po každém použití – propláchnout čistou vodou nebo slabým dezinfekčním roztokem (poměr 1:100).
5. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou křemenné perličky poškozeny – může dojít k nedostatečnému vyčištění nástrojů.
6. Skleněné perličky by měly být dány do přístroje nejprve před zapnutím přístroje.
7. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
8. Nevkládejte do sterilizátoru nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem: 152 ml

Doporučená provozní doba: 15 – 40 min

Výkon: 80 W

Rozměry výrobku: 20 x 20 x 19 cm

Hmotnost produktu: 0,8 kg

Rozměry balení: 22 x 22 x 22 cm

Hmotnost balení: 1,4 kg

Napětí: 220V-240V

Frekvence: 50-60Hz



Sterilizátor SilverFox S-01M

VITAJTE!

Ďakujeme za nákup. Pred použitím prístroj si prosím pozorne prečítate nasledujúce inštrukcie. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dôjde pri nesprávnom použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sú v návode uvedené nejaké chyby, prosím informujte výrobcu alebo dodávateľa.

Vysokoteplotný sterilizátor má okamžitú čistiaci a sterilizačnú funkciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratória atď., Na sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC

NÁVOD K POUŽITIU

1. Do prístroja vsypte všetky priložené perličky. Prístroj zapojte do el. siete a zapnite ho. Stlačte prepínač, prístroj vydá zvukový signál a prístroj začne nahrievať a odpočítavať 15 minút do úplného nahriatie.
2. Po uplynutí tejto doby sa ozve 3x signál a prístroj je pripravený na použitie.
3. Teraz môžete do sterilizátora vložiť nástroje a stlačením tlačidla "START" ho uvediete do prevádzky. Sterilizácia trvá 20 sekúnd. Po dokončení sterilizácie sa ozve 3x signál.

UPOZORNENIE

1. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. V kúpeľni a pod.).
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
4. Kremenné perličky vnútri sterilizátora je nutné čistiť po každom použití - prepláchnuť čistou vodou alebo slabým dezinfekčným roztokom (pomer 1: 100).
5. Nepoužívajte prístroj, ak sú kremenné perličky poškodené - môže dôjsť k nedostatočnému vyčisteniu nástrojov.
6. Sklené perly by mali byť dané do prístroja najprv pred zapnutím prístroja.
7. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovou taškou alebo iným prikrývkou.
8. Nevkladajte do sterilizátora nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem: 152 ml

Odporúčaná prevádzková doba: 15 - 40 min

Výkon: 80 W

Rozmery výrobku: 20 x 20 x 19 cm

Hmotnosť produktu: 0,8 kg

Rozmery balenia: 22 x 22 x 22 cm

Hmotnosť balenia: 1,4 kg

Napätie: 220V-240V

Frekvencia: 50-60 Hz