

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dochází při nesprávném použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou v tomto návodu uvedeny nějaké chyby, prosím neváhejte a pošlete nám informující e-mail, abychom mohli chyby opravit.

Sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných nástrojů.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické komptabilitě: 2004/108/EC

## NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Vložte nástroje pro sterilizaci do odnímatelné zásuvky.
2. Zásuvku zasuňte zpět do sterilizátoru.
3. Zapněte pomocí tlačítka sterilizátor. Žárovka se rozzáří fialovým světlem a začíná sterilizace.
4. Doporučená doba sterilizace je 30 - 45 minut.
5. Po uplynutí doby je možné zásuvku vysunout, světlo zhasne a nástroje je možné použít.
6. Za pomoci tlačítka sterilizátor vypněte.

## UPOZORNĚNÍ

1. Po dokončení sterilizace odpojte přístroj od sítě.
2. Nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
3. Síťové připojení sterilizátoru nijak neprodlužujte.
4. Po připojení sterilizátoru do sítě nenechávejte přístroj bez dozoru či případně v blízkosti dětí.
5. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
6. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
7. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
8. Nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné, se nesmí v tomto přístroji používat.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Doporučená provozní doba:** 30 - 45 minut

**Výkon:** 9 W

**Rozměry výrobku:** 40 x 24 x 21 cm

**Hmotnost produktu:** 2 kg

**Rozměry balení:** 41 x 25,2 x 22 cm

**Rozměr odnímatelné zásuvky:** 31 cm x 20 x 10,5 cm

**Hmotnost balení:** 3 kg

**Napětí:** 220 V – 240 V

**Frekvence:** 50 - 60 Hz

**Vlnová délka:** 180 nm - 254 nm

**Délka kabelu:** 1,7 m

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nie ste istí správnym použitím prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dochádza pri nesprávnom použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ sú v tomto návode nejaké chyby, pošlite nám prosím informujúce email, aby sme mohli chyby napraviť.

Sterilizátor má okamžité čistenie a sterilizáciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratória atď., na sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov.

## ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej komptabilite: 2004/108/EC

## NÁVOD K POUŽITIU

1. Vložte nástroje na sterilizáciu do odnímateľnej zásuvky.
2. Zásuvku zasunúť späť do sterilizátora.
3. Zapnite pomocou tlačidla sterilizátor. Žiarovka sa rozžiarí fialovým svetlom a začína sterilizácia.
4. Odporúčaná doba sterilizácie je 30 - 45 minút.
5. Po uplynutí doby je možné zásuvku vysunúť, svetlo zhasne a nástroje je možné použiť.
6. Pomocou tlačidla sterilizátor vypnite.

## UPOZORNENIE

1. Po dokončení sterilizácie odpojte prístroj od siete.
2. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni a pod.).
3. Sieťové pripojenie sterilizátora nijako nepredlžujte.
4. Po pripojení sterilizátora do siete nenechávajte prístroj bez dozoru či prípadne v blízkosti detí.
5. Prístroj používajte v dobre ventilovanom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
6. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
7. Pokiaľ je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovou taškou alebo iným prikrývkou.
8. Nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné, sa nesmú v tomto prístroji používať.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Odporúčaná prevádzková doba:** 30 - 45 minút

**Výkon:** 9 W

**Rozmery výrobku:** 40 x 24 x 21 cm

**Hmotnosť produktu:** 2 kg

**Rozmery balenia:** 41 x 25,2 x 22 cm

**Rozmer odnímateľnej zásuvky:** 31 cm x 20 x 10,5 cm

**Hmotnosť balenia:** 3 kg

**Napätie:** 220 V – 240 V

**Frekvencia:** 50 - 60Hz

**Vlnová dĺžka:** 180 nm - 254 nm

**Dĺžka kábla:** 1,7 m