

## Digitální sterilizátor Weelko S-01

### VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před použitím přístroje. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou odpovědnost za případné úrazy, k nimž dochází při nesprávném použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou uvedeny nějaké chyby tomto návodu, prosím neváhejte a pošlete nám informující e-mail, abychom mohli chyby opravit.

Vysokoteplotní sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných kovových nástrojů.

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické komptabilitě: 2004/108/EC

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Přístroj zapněte do elektrické sítě a uveďte jej do provozu. Stiskněte tlačítko přepínače, zazní signál a na displeji se zobrazí "15", přístroj se nahřívá. To bude trvat 15 minut až na požadovanou sterilizační teplotu. Během nahřívací doby, displej uvádí "15". Číslo na displeji odpočítává 15. 14. 13 .... a tlačítka jsou během ohřevu dočasně uzamčena.

2. Po 15 minutách nahřívání se ozve signál - třikrát, aby vám připomněl, že je přístroj připraven ke sterilizaci a displej zapne "0" – pohotovostní režim.

Nyní můžete dát do sterilizátoru nástroje k čištění a stiskněte tlačítko "START". Displej ukazuje "20" sekund, pak odpočítává při sterilizaci. Po 20 sekundách se ozve signál - třikrát, který Vám připomene, že sterilizace je hotova a můžete nástroje vyndat.

Nyní se přístroj zapne opět automaticky "00" jako stav "stand-by". Proces můžete opakovat znovu pro další sterilizaci.

3. Stroj je navržen tak, aby se sám po 8 hodinách nečinnosti přepnul do samoochranné funkce.

Pokud je v okamžiku, kdy je stroj v pohotovostním režimu, bzučák 5krát zapípá a automaticky zastaví topení, a přepne se do stavu "stand-by" "--".

Pokud je přístroj v procesu sterilizace, pak stroj bude čekat, až sterilizace skončí, přestane vytápět, přepne se do samoochranného stavu "--".

4. Pokud je přístroj přepnutý do samoochranného stavu a chcete jej znovu použít ke sterilizaci, vypněte jej na vteřinu a zapněte znovu, pak budete potřebovat dalších 15 minut, aby se opět ohřál ke sterilizaci.

### UPOZORNĚNÍ

1. Prosím nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
2. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
4. Skleněné perličky uvnitř sterilizátoru je nutné čistit po každém použití.
5. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou skleněné perličky rozbité, protože poničené perličky mohou nástroje ušpinit a špatně čistí.
6. Skleněné perličky by měly být dány do přístroje nejprve před zapnutím přístroje.
7. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
8. Nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné, se nesmí v tomto přístroji používat.

---

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Doporučená provozní doba:** 15 min

**Výkon:** 80 W

**Rozměry výrobku:** 20 x 20 x 19 cm

**Hmotnost produktu:** 0,8 kg

**Rozměry balení:** 22 x 22 x 22 cm

**Hmotnost balení:** 1,25 kg

**Napětí:** 100V-120V/220V-240V

**Frekvence:** 50-60Hz

## Digitálny sterilizátor Weelko S-01

### VITAJTE!

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nie ste istí správnym použitím prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dochádza pri nesprávnom použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ sú v tomto návode nejaké chyby, pošlite nám prosím informujúce email, aby sme mohli chyby napraviť.

Vysokoteplotný sterilizátor má okamžité čistenie a sterilizáciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratória atď., na sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov.

### ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej komptabilite: 2004/108/EC

### NÁVOD K POUŽITIE

1. Prístroj zapnite do elektrickej siete a uveďte ho do prevádzky. Stlačte tlačidlo prepínače, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "15", prístroj sa nahrieva. To bude trvať 15 minút až na požadovanú sterilizačnú teplotu. Počas nahrievacie doby, displej uvádza "15". Číslo na displeji odpočítava 15. 14. 13 .... a tlačidlá sú počas ohrevu zamknuté.

2. Po 15 minútach nahrievania sa ozve signál - trikrát, aby vám pripomenul, že je prístroj pripravený na sterilizáciu a displej zapne "0" - pohotovostný režim.

Teraz môžete dať do sterilizátora nástroja na čistenie a stlačte tlačidlo "START". Na displeji sa zobrazí "20" sekúnd, potom sa počas sterilizácie odpočíta. Po 20 sekundách sa ozve signál - trikrát, ktorý Vám pripomenie, že sterilizácia je hotová a môžete nástroje vybrať.

Teraz sa prístroj zapne opäť automaticky "00" ako stav "stand-by". Proces môžete opakovať znovu pre ďalšie sterilizáciu.

3. Stroj je navrhnutý tak, aby sa sám po 8 hodinách nečinnosti prepel do samoochranné funkcie.

Ak je v okamihu, keď je stroj v pohotovostnom režime, bzučiak 5krát zapípa a automaticky zastaví kúrenie, a prepne sa do stavu "stand-by" "-".

Pokiaľ je prístroj v procese sterilizácie, potom stroj bude čakať, až sterilizácia skončí, prestane vykurovať, prepne sa do samoochranného stavu "-".

4. Ak je prístroj prepnutý do samoochranného stavu a chcete ho znovu použiť na sterilizáciu, vypnite ho na sekundu a zapnite znovu, potom budete potrebovať ďalších 15 minút, aby sa opäť ohrial na sterilizáciu.

### UPOZORNENIE

1. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni atď.).
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
4. Sklenené perly vnútri sterilizátora je nutné čistiť po každom použití.
5. Nepoužívajte prístroj, ak sú sklenené perličky rozbité, pretože poškodené perličky môžu nástroje ušpiniť a zle čistiť.
6. Sklenené perly by mali byť dané do prístroja najprv pred zapnutím prístroja.
7. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovou taškou alebo iným prikrývkou.
8. Nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné, sa nesmie v tomto prístroji používať.

---

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Objem:** 152 ml

**Odporúčaná prevádzková doba:** 15 min

**Výkon:** 80 W

**Rozmery výrobku:** 20 x 20 x 19 cm

**Hmotnosť produktu:** 0,8 kg

**Rozmery balenia:** 22 x 22 x 22 cm

**Hmotnosť balenia:** 1,25 kg

**Napätie:** 100V-120V / 220V-240V

**Frekvencia:** 50-60 Hz